

sigvaris

WRAPY Compreflex® Compreboot



Proste rozwiązania w przypadku

- obrzęku żylnego • limfatycznego
- tłuszczowego oraz w leczeniu ran

SIGVARIS terapia kompresyjna

Wyroby nieelastyczne na każdym etapie leczenia.

Obrzęk limfatyczny, choroby żyłne i leczenie ran to tylko kilka wskazań, w których wyroby medyczne SIGVARIS pomagają w ramach terapii kompresyjnej.

Lekarze, sprzedawcy i pacjenci wnieśli wkład do projektu wzorów i zdefiniowaniu cech każdego produktu SIGVARIS.

Rezultatem tych działań jest gama produktów na wiele rodzajów obrzęków, ale w jednym celu

... poprawy jakości życia.



Spis treści

Wrapy wyroby nieelastyczne



Szybkie wyszukiwanie produktów	6
Wrapy Łydka	
Compreflex® Standard	8
Compreflex® Transition	10
Compreflex® Complete	11
Wrapy Stopa	
Compreboot Standard	12
Compreboot Plus	13
Podkolanówki	
Podkolanówki spodnie, bezuciskowe BASIC	14
Podkolanówki spodnie, uciskowe TRANSITION	14
Podkolanówki spodnie, uciskowe COMPLETE	15
Podkolanówki spodnie, bawełniane COTTON	15
Akcesoria	
Accutab®	16
Paski Przedłużające	18
Tabele rozmiarów	
Wrapy Łydka, Wrapy Stopa i Podkolanówki	19

Szybkie wyszukiwanie produktów

	Wyrób	Część ciała	Wskazania						Poziom kompresji w mmHg	W komplecie podkolanówka				Inne	Strona
Wrapy na nogę			Obrzęk limfatyczny	Obrzęk	Przewlekła choroba żył (CVD)	Przewlekła niewydolność żylna (CVI) w tym między innymi: wrzód spowodowany zastojem żylnym	Obrzęk tłuszczowy			Basic	Transition	Complete	Bawełna	Accutab®	
	Wrap Łydka Compreflex® Standard	Łydka 	●	●	●	●	●	21–46		●				●	8
	Wrap Łydka Compreflex® Transition	Łydka 	●	●	●	●	●	21–46			●			●	10
	Wrap Łydka Compreflex® Complete	Łydka 	●	●	●	●	●	21–46				●		●	11

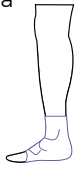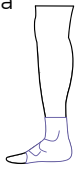	Wyrób	Część ciała	Wskazania						Poziom kompresji w mmHg	Strona
Wrapy na stopę			Obrzęk limfatyczny	Obrzęk	Przewlekła choroba żył (CVD)	Przewlekła niewydolność żylna (CVI) w tym między innymi: wrzód spowodowany zastojem żylnym	Obrzęk tłuszczowy			
	Wrap Stopa Compreboot Standard	Stopa 	●	●	●	●	●	≤40		12
	Wrap Stopa Compreboot Plus	Stopa 	●	●	●	●	●	≤40		13

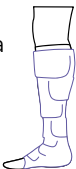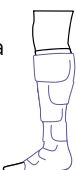

	Wyrób	Część ciała	Poziom kompresji w mmHg	Strona
Podkolanówki	Podkolanówki spodnie, bezuciskowe BASIC	Łydka i Stopa 	Bezkompresyjne	14
	Podkolanówki spodnie, uciskowe TRANSITION	Łydka i Stopa 	10–15 w obszarze stopy i kostki	14
	Podkolanówki spodnie, uciskowe COMPLETE	Łydka i Stopa 	10–15 w obszarze stopy, kostki i łydki	15
	Podkolanówki spodnie, bawełniane COTTON	Łydka i Stopa 	Bezkompresyjne	15

Wrap łydka Compreflex® Standard



Kiedy stosować

- Nie wymagane działanie kompresyjne podkolanówek
- Możliwość dopasowania innego rozmiaru Wrapa Compreboot
- Możliwość noszenia standardowego obuwia wraz z podkolanówką

Poziom kompresji

21–46 mmHg

Wskazania

- Obrzęk limfatyczny
- Obrzęk
- Przewlekła choroba żył (CVD)
- Przewlekła niewydolność żylna (CVI) w tym między innymi: wrzód spowodowany zastojem żylnym
- Obrzęk tłuszczowy

Zawiera

- Bezkompresyjne podkolanówki Basic



- Accutab®

Wrap łydka Compreflex® Standard

Charakterystyka produktu

Inteligentna konstrukcja

Wrap jest profilowany, co zapewnia doskonałe dopasowanie do łydki.

Łatwe zakładanie

Dzięki elastycznej wstawce z przodu, utrzymującej wrap na miejscu oraz paskom, które można zwinąć do tyłu, wrap daje się łatwo założyć i dopasować, co pomaga utrzymać poziom zaleceń lekarza.

Materiały najwyższej jakości

Miękki, dopasowujący się Breathe-O-Prene® zapewnia wygodę i odprowadzanie wilgoci, poprawiając stan skóry.



Bezproblemowe wrapy kompresyjne

Martwisz się, że Twój wrap jest zbyt ciasny lub zbyt luźny? Każdy wrap Compreflex® zawiera opatentowany Accutab®, który posiada wyraźnie oznaczone zakresy i dokładnie wskazuje poziom kompresji stosowanej na kończynie. Takie rozwiązanie sprawia, że każdorazowe, dokładne ustawienie kompresji jest wyjątkowo łatwe.

Niezależność i komfort

Zaprojektowany tak, aby poruszać się razem z Tobą, Compreflex® Standard łydka zapewnia stałą kompresję, nie ograniczając zakresu ruchu ani komfortu. Każdy wrap kompresyjny posiada funkcje, które ułatwiają zakładanie i zdejmowanie, co daje Ci swobodę i niezależność w noszeniu wrapa zależnie od Twoich potrzeb.

Wrap Łydka Compreflex® Transition



Kiedy stosować

- Pożądana jest łagodna kompresja **wywierana przez podkolanówkę uciskową** na stopę i kostkę
- Możliwość noszenia obuwia

Poziom kompresji

21–46 mmHg


Wskazania

- Obrzęk limfatyczny
- Obrzęk
- Przewlekła choroba żył (CVD)
- Przewlekła niewydolność żylna (CVI) w tym między innymi: wrzód spowodowany zastojem żylnym
- Obrzęk tłuszczowy

Zawiera

- Podkolanówki uciskowe Transition – kompresja na stopie i kostce

- Accutab®

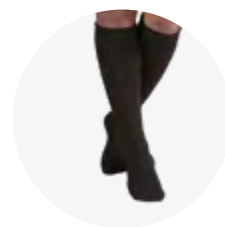

Wrap łydka Compreflex® Complete



Kolor

Czarny



Tabela rozmiarów: patrz strona 19

Kiedy stosować

- Wymagana jest łagodna kompresja na stopie, kostce i łydce **zapewniona przez Podkolanówkę uciskową Complete**
- Możliwość noszenia standardowego obuwia

Poziom kompresji

21–46 mmHg

Wskazania

- Obrzęk limfatyczny
- Obrzęk
- Przewlekła choroba żył (CVD)
- Przewlekła niewydolność żylna (CVI) w tym między innymi: wrzód spowodowany zastojem żylnym
- Obrzęk tłuszczowy

Zawiera

- Podkolanówkę uciskową Complete
- Accutab®



Wrap Stopa Compreboot Standard



Cechy

- Poziom kompresji: ≤ 40 mmHg
- Idealny w przypadku łagodnego i umiarkowanego obrzęku / obrzęku limfatycznego
- Zawiera neopren z zapięciami na rzepy
- Rozciąganie w czterech kierunkach zapewnia mocną kompresję wokół kostki
- Odkryta pięta i palce

Kolor

Czarny



Tabela rozmiarów: patrz strona 19

Wrap Stopa Compreboot Plus



Cechy

- Poziom kompresji: ≤ 40 mmHg
- Idealny w przypadku przewlekłego / ostrego obrzęku / obrzęku limfatycznego
- Piankowa wyściółka
- Odłączane elementy zapewniające przyczepność
- Paski można zdejmować w celu indywidualnego dopasowania lub wymiany

Kolor

Czarny



Tabela rozmiarów: patrz strona 19

Rozwiązanie Wrap do zastosowania na stopę i kostkę

Kompresja stóp i kostek jest ważna dla gojenia. Wrapy Compreflex obejmują podkolanówki bezkompresyjne i kompresyjne, zapewniające wsparcie kończyny dolnej, plus możliwe do skompletowania dla stopy Wrapy Stopa Compreboot. Wrap Stopa Compreboot Standard zapewnia pożądaną kompresję, a Wrap Stopa Compreboot Plus silniejsze wsparcie kończyny.

Podkolanówki spodnie do Wrapów

Podkolanówki spodnie, bezuciskowe BASIC



Kolor

Szary



Cechy

- Łatwe do zakładania podkolanówki o długości do kolan
- Drirelease® odprowadza wilgoć i redukuje zapach
- Płaskie szwy zwiększające komfort
- Jony srebra o właściwościach bakteriostatycznych
- Rozmiar uniwersalny

W komplecie:

- Compreflex® Standard
- Dostępne również oddzielnie

Podkolanówki spodnie, uciskowe TRANSITION



10– 15 mmHg
w obszarze
stopy i kostki

Kolor

Czarny



Cechy

- Miękkie podkolanówki o długości do kolan z płaskimi szwami
- Drirelease® odprowadza wilgoć i redukuje zapach
- Łagodna kompresja stopy i kostki
- Wyściełana podeszwa od palców do pięty dla większego komfortu
- Jony srebra o właściwościach bakteriostatycznych
- Rozmiary: tabela rozmiarów na stronie 19

W komplecie:

- Compreflex® Transition Łydka
- Dostępne również oddzielnie

Podkolanówki spodnie do Wrapów

Podkolanówki spodnie, uciskowe COMPLETE

10–15 mmHg
w obszarze stopy,
kostki i łydki

Kolor

Czarny



Cechy

- Wygodne podkolanówki o długości do kolan
- Drirelease® odprowadza wilgoć i redukuje zapach
- Łagodna kompresja w obszarze stopy, kostki i łydki
- Wyściełana podeszwa od palców do pięty dla większego komfortu
- Jony srebra o właściwościach bakteriostatycznych
- Rozmiary: tabela rozmiarów na stronie 19

W komplecie:


- Compreflex® Complete łydka
- Dostępne również oddzielnie

Podkolanówki spodnie, bawełniane COTTON

Bezkompresyjne

Kolor

Naturalny

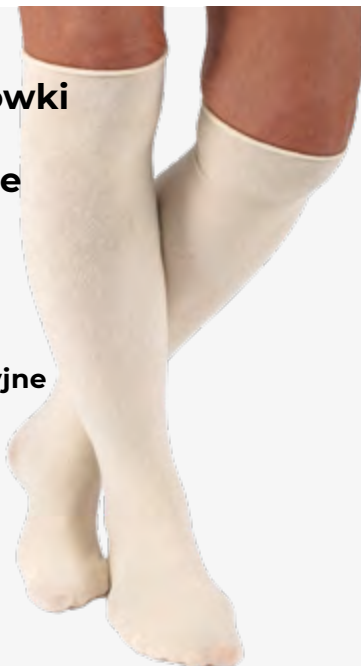

Cechy

- Miękkie
- Bezszywowe
- 100% bawełny
- Rozmiar uniwersalny

Dostępne oddzielnie

Łatwe i precyzyjne ustawianie kompresji **Accutab® do Compreflex®**

Co to jest Accutab®?

Accutab® to proste narzędzie, które łatwo przymocować do wyrobów Compreflex®

Korzystając z Accutab® pacjenci mogą ustawić początkowy poziom kompresji spoczynkowej na przykład w określonym zakresie 21–46 mmHg.




Jak działa Accutab®?

Accutab® pomaga pacjentom w prawidłowym napięciu pasków wyrobu poprzez korelację siły naciągu przyłożonej do paska z liniami oznaczającymi nacisk na wyrobie.

Łatwe w użyciu

1. Delikatnie ułożyć paski Compreflex® na miejscu, bez rozciągania materiału
2. Przymocować Accutab® na końcu każdego paska
3. Pociągnąć każdy pasek do przepisanej poziomu wskazanego na Accutab®:
<21 mmHg, 23–32 mmHg lub 34–46 mmHg

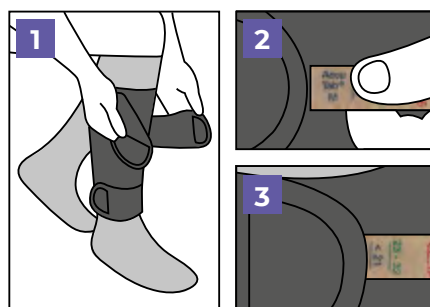

Uwaga: wyroby nieelastyczne są wyrobami do terapii kompresyjnej stosowanymi na kończynach górnych i dolnych. Terapia kompresyjna poprawia przepływ żylny i limfatyczny, zmniejszając obrzęk żylny i limfatyczny. Produkt jest przeznaczony do wielokrotnego użytku. Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i skonsultować się z lekarzem, w przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych. Wymienione środki ostrożności i przeciwwskazania są jedynie wskazówkami i nie zastępują konsultacji z lekarzem.

Sprawdzona precyzja ciśnienia spoczynkowego

Accutab® został poddany rygorystycznym testom zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach International Compression Club Consensus.^{1,2}

Testy przeprowadzono przy użyciu PicoPress® o znanej wysokiej dokładności i powtarzalności.³

Accutab® wyniki: 20–30 mmHg




Efektywne ciśnienie robocze

Ciśnienie robocze

Chodzenie, wchodzenie po schodach, wstawanie, stanie na palcach

ciśnienie
spoczynkowe
zakładanie
Compreflex®

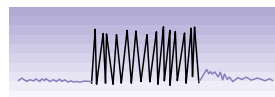

ciśnienie
spoczynkowe
leżenie / siedzenie
w bezruchu

- Nieelastyczne wyroby kompresyjne zmniejszają obrzęk nóg i poprawiają przepływ krwi żyłnej.^{4,5}
- Nieelastyczne wyroby kompresyjne mogą zwiększać perfuzję tętniczą u pacjentów z łagodną do umiarkowanej chorobą tętnic obwodowych.^{4,5}

Accutab® – Bezpieczne, precyzyjne i spoczynkowe ciśnienie

- Nieelastyczne wyroby kompresyjne można bezpiecznie stosować u pacjentów z łagodną do umiarkowanej chorobą tętnic obwodowych.^{4,5}
- Accutab® zapewnia precyzyjne początkowe ciśnienie spoczynkowe, podczas zakładania SIGVARIS Compreflex®.

1. Partsch H, et al. Measurement of lower leg compression in vivo: recommendations for the performance of measurements of interface pressure and stiffness. *Dermatologic Surgery* 2006;32(2):224–233.

2. Fan M, et al. LipidGO: database for lipid-related GO terms and applications. *Bioinformatics* 2014;30(7):1043–1044.

3. Mosti G, Rossari S. The importance of measuring sub bandage pressure and presentation of new measuring device. *Acta Vulnol* 2008;6:31–36.

4. Mosti G, Iabichella M, Partsch H. Compression therapy in mixed ulcers increases venous output and arterial perfusion. *Journal of vascular surgery* 2012;55(1):122–128.

5. Mosti G. Compression in mixed ulcers: venous side. *Phlebology* 2014;29(1):13–17.

Paski Przedłużające



Cechy

- Łatwe w użyciu
- Dodaje do 10 cm w obwodzie
- Łatwo się odpina
- Niedrogie rozwiązanie dla pacjentów, których rozmiar przekracza zakres standardowy wyrobów Compreflex® na nogi lub którzy potrzebują indywidualnych rozmiarów

Kolor

Czarny



Tabele rozmiarów

Compreflex® Standard / Transition / Complete Łydka (B-D)

	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
D	29–39 cm	34–44 cm	40–50 cm	46–56 cm	54–64 cm
C	29–39 cm	34–44 cm	40–50 cm	46–56 cm	54–64 cm
B1	24–34 cm	29–39 cm	34–44 cm	39–49 cm	44–55 cm
B	19–26 cm	21–30 cm	26–36 cm	31–41 cm	36–46 cm
L1	REGULAR: 30–33.9 cm TALL: 34–42 cm				

Compreboot Standard & Compreboot Plus (A–Y)

	SMALL		MEDIUM / LARGE		X-LARGE / XX-LARGE	
	REGULAR	LONG	REGULAR	LONG	REGULAR	LONG
Y	28–36 cm	28–36 cm	≤39 cm	≤39 cm	≤44 cm	≤44 cm
A	22–26 cm	22–26 cm	≤30 cm	≤30 cm	≤33 cm	≤33 cm
Ai	14–18 cm	19–23 cm	18–20 cm	23–25 cm	20–22 cm	25–27 cm

Podkolanówki Transition & Complete

	SMALL		MEDIUM		LARGE		X-LARGE		XX-LARGE	
	Euro	UK	Euro	UK	Euro	UK	Euro	UK	Euro	UK
MĘSKIE	<39	<5.5	39–42	6–8.5	42–44	8.5–10.5	44–47	10.5–13.5	44.5–47	11–13.5
DAMSKIE	<38	<5.5	38–40	5.5–7.5	40–43	7.5–10	>43	>10	–	–
C	29–39 cm		34–44 cm		40–50 cm		46–56 cm		54–64 cm	
B	19–26 cm		21–30 cm		26–36 cm		31–41 cm		36–46 cm	

sigvaris

SIGVARIS S.A.

ul. Powidzka 50, Gutowo Małe,
62-300 Września
tel.: +48 61 43 88 200
fax: + 48 61 43 88 213

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel.: 801 081 121
email: salespl@sigvaris.com
www.sigvaris.com



SIGVARIS
GROUP